

T-C

TAE CHANG INDUSTRIAL CO, LTD.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, PRESENTACIÓN Y MODO DE USO

1.- AGUJAS DE PUNCION LUMBAR

LA PUNCION LUMBAR O RAQUIDEA es un procedimiento de diagnóstico o tratamiento realizado por un médico. El procedimiento consiste en introducir una aguja hueca en el espacio subaracnoideo del área lumbar (parte inferior) de la columna vertebral. El espacio subaracnoideo es el canal de la columna vertebral que transporta el líquido cefalorraquídeo (LCR) entre el cerebro y la medula espinal.

También puede realizarse como tratamiento para inyectar medicamentos directamente en la medula espinal. Algunos medicamentos que pueden administrarse a través de la punción lumbar (en forma intratecal) son: anestesia raquídea, antes de intervención quirúrgicas; colorante de contraste para estudio radiológicos (por ejemplo, mielografía), y medicamentos quimioterapéuticos para tratar el cáncer.

CONDICIÓN BIOLÓGICA: Estéril, Atoxica, Apirógeno, Hipoalergénico.

2.- MODELOS DE LA AGUJA: PUNTA QUINCKE O PUNTA LAPIZ

- Adaptable a conexiones de equipo manométrico (LCR)
- El mandril se ajusta al conector tipo Luer Lock.
- Aguja sin imperfecciones ni rebabas

3.1 - DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA AGUJA

COMPONENTES	MATERIAL
CANULA	Acero inoxidable para uso clínico hospitalario
CUBO PARA CANULA	Policarbonato
ESTILETE INTRODUTOR	Acero Inoxidable
CUBO PARA ESTILETE	Polipropileno
CUBIERTA	Polipropileno
ALAS	Polipropileno

3.2.- COLORES DE ACUERDO A LA MEDIDA:

Nº MEDIDA	COLOR	LONGITUD
16G	BLANCO	1 ½ (38MM) – 3 ½ (90MM)
17G	VIOLETA	1 ½ (38MM) – 3 ½ (90MM)
18G	ROSADO	1 ½ (38MM) – 3 ½ (90MM)
19G	CREMA	1 ½ (38MM) – 3 ½ (90MM)
20G	AMARILLO	1 ½ (38MM) – 3 ½ (90MM)
22G	NEGRO	1 ½ (38MM) – 3 ½ (90MM)
23G	AZUL	1 ½ (38MM) – 3 ½ (90MM)
25G	NARANJA	1 ½ (38MM) – 3 ½ (90MM)
26G	MARRON	1 ½ (38MM) – 3 ½ (90MM)
27G	GRIS	1 ½ (38MM) – 3 ½ (90MM)

4.- INSTRUCCIONES DE USO

La punción lumbar puede realizarse por varios motivos. El motivo más frecuente es extraer una pequeña cantidad de LCR para examinarlo y diagnosticar diversos trastornos. También puede realizarse como tratamiento para inyectar medicamentos directamente en la medula espinal.

- El paciente se acuesta de lado. Algunas veces, este procedimiento se realiza con la persona sentada, pero doblada adelante.
- Después de limpiar la espalda, el medico inyecta anestésico local en la región lumbar.
- Se inserta una aguja espinal, generalmente en el área lumbar.
- Una vez que se ha insertado la aguja, adecuadamente, se mide la presión del líquido cefalorraquídeo y se recoge la muestra.
- Luego se retira la aguja, se limpia el área y se aplica un vendaje sobre el sitio. Con frecuencia, se le pide a la persona permanecer acostada por un breve tiempo.

5.- PRECAUCIONES DE USO

- No usar si el producto si el paquete está abierto o dañado
- El producto debe ser manejado únicamente por un doctor profesional autorizado por la autoridad sanitaria del país.
- No reutilizar. El producto es de un solo uso
- No reesterilizar.
- No almacenar en temperaturas o humedad extremas.

6.- PRESENTACIÓN

Inmediato : Empaque tipo blister de papel grado quirúrgico y polietileno transparente x 01 aguja de punción que garantiza la esterilidad e integridad de la aguja. Es fácil de abrir. Está exento de partículas extrañas y rebabas y aristas cortantes.

Mediato : Caja x 50 und

Embalaje : Caja x 500 unds